

Prélèvement Sanguin à l'aide la S-Monovette®


La solution idéale pour des résultats parfaits

1 Préparation




Positionner l'étiquette code-barres

Ligne de code-barres

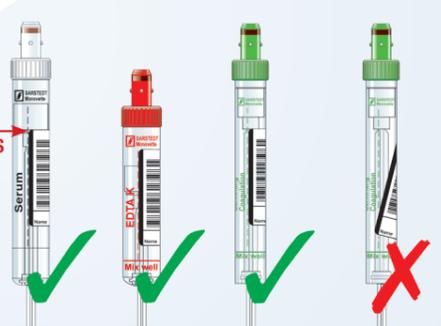

Désinfecter selon les consignes internes

Constriction <1 min

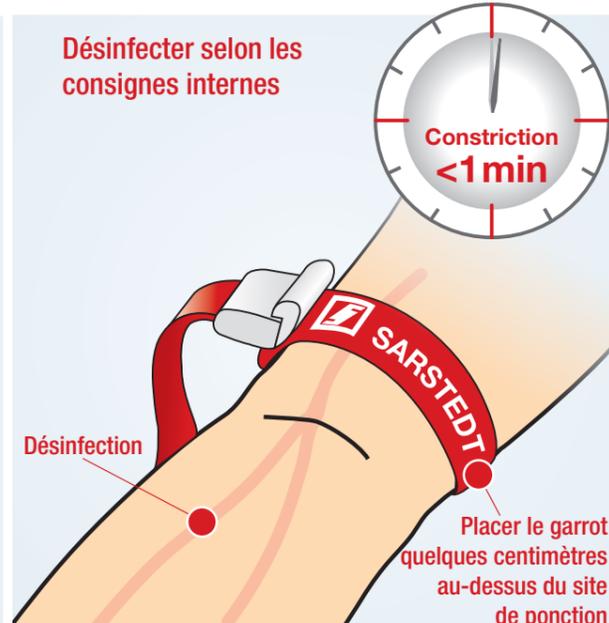

Désinfection

Placer le garrot quelques centimètres au-dessus du site de ponction

Respecter l'ordre de prélèvement (Code couleur EU)

Hémoculture

Sérum / Sérum Gel^{1a} OU Citraté^{1b,2}

Héparine / Héparine Gel


EDTA

Fluorure / Citrate Fluorure

2 Prélèvement Sanguin


Principe par aspiration – La technique douce pour un meilleur confort du patient

Avant la ponction veineuse: „réchauffer“ le patient

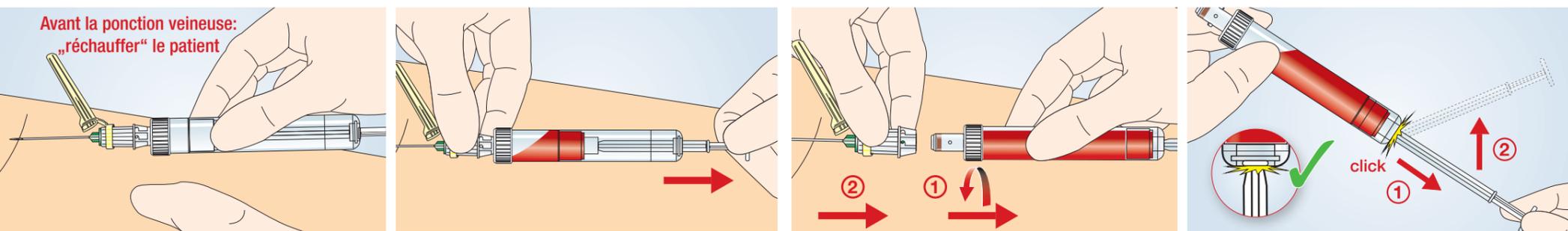

Principe du vide³ – Un vide „toujours frais“ créé in situ

Avant la ponction veineuse: „réchauffer“ le patient

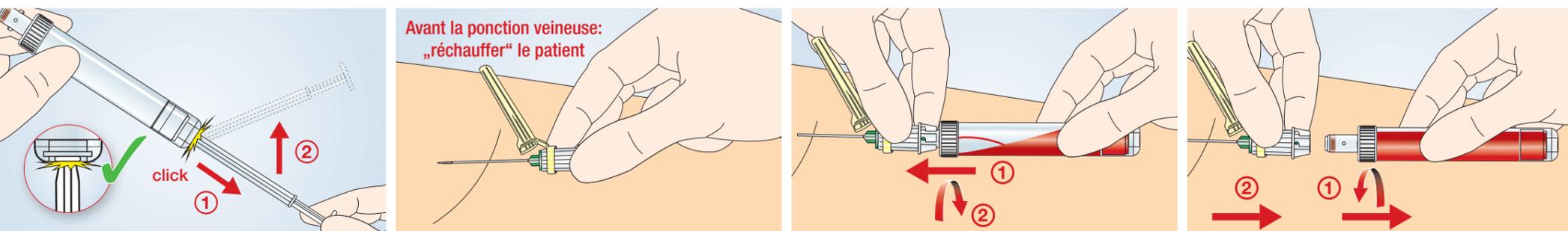


3 Manipulation de l'échantillon et mise au rebut

Veiller à BIEN remplir le tube pour obtenir des résultats corrects

- Citrate
- VS
- EDTA
- Citrate Fluorure

Mélanger soigneusement 8 - 10 x les échantillons par retournements lents

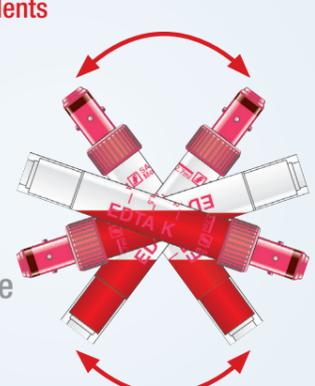


- Citrate
- VS
- Héparine
- EDTA
- Fluorure
- Citrate Fluorure
- CPDA₁
- CTAD

Traiter de façon adaptée

Après le prélèvement, stocker la S-Monovette® Sérum / Sérum gel en position verticale pendant 30 min.



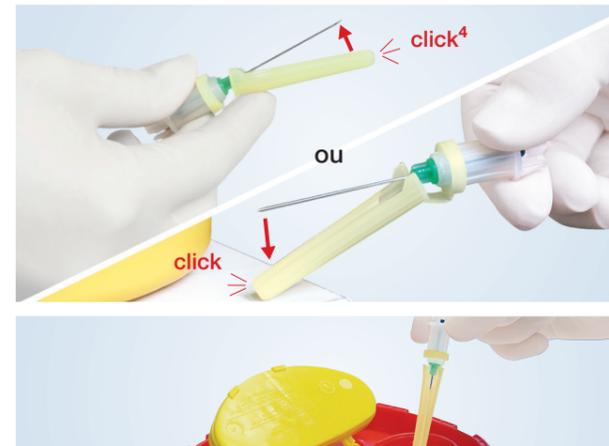

click⁴

ou

click

Il est à noter que les sujets abordés ici („Prélèvement Sanguin à l'aide la S-Monovette®“) constituent de simples recommandations et ne sauraient en aucun cas remplacer l'expertise médicale, scientifique ou technologique.

 **SARSTEDT**

www.sarstedt.com • info.fr@sarstedt.com

^{1a} Gurr et al "Musterstandardarbeitsanweisung Präanalytik" J Lab Med 2011

^{1b} Recommandation en conformité avec le standard H3-A6(GP 41-A6) du CLSI: „Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture; Approved Standard – Sixth Edition.“

² Il est recommandé de prélever un tube de purge lorsque le premier tube requis est un tube citraté.

³ Pour commencer le prélèvement sanguin doucement, nous recommandons généralement de prélever la première S-Monovette® par la méthode d'aspiration. Ensuite continuer avec la méthode sous-vide.

⁴ Vous pouvez aussi activer le protecteur d'aiguille en utilisant votre index. Pour une opération sûre, assurez-vous de presser contre la partie basse du dispositif de protection.