

AIDE AU PRELEVEMENT – PRELEVEMENTS SANGUINS POUR ETUDES MOLECULAIRES
SITE DE TROUSSEAU**ECHANTILLONS SANGUINS POUR EXTRACTION D'ADN**- Prélèvement (stérile) :

- 5 ml (enfants) à 10 ml (adultes) de sang total collecté sur tube **EDTA**
Etiqueter les tubes avec Nom, Prénom, Date de naissance et Sexe
- Conservation et transport à **température ambiante** avec **délai maximum d'acheminement recommandé de 48 heures**. Les prélèvements doivent arriver de préférence au laboratoire entre le lundi et le jeudi

- Documents à joindre à l'envoi :

- Pour chaque personne prélevée : un consentement pour études génétiques signé par le prescripteur et le patient (formulaires différents pour les personnes majeures et mineures).
- Pour chaque personne prélevée : formulaire de renseignements cliniques de notre laboratoire
- Un arbre généalogique

- Envoyer l'ensemble à l'adresse suivante :

Pr. Serge Amselem / Dr. Marie Legendre / Dr. Irina Giurgea / Dr. Camille Louvrier
U.F. de Génétique Moléculaire
Bâtiment Ketty Schwartz
Hôpital Armand-Trousseau
26 Avenue du Docteur Arnold Netter
75571 PARIS CEDEX 12
(Tel +33 1 44 73 52 95)

- Transport à **température ambiante**


ECHANTILLONS SANGUINS POUR EXTRACTION D'ARN- Prélèvement (stérile) : Tube PAXgene

- **5 ml de sang total** soit **2 tubes PAXgene Blood RNA Tube**.
Etiqueter les tubes avec Nom, Prénom, Date de naissance et Sexe
- Conservation et transport à **température ambiante** avec **délai maximum d'acheminement recommandé de 48 heures**. Les prélèvements doivent arriver de préférence au laboratoire entre le lundi et le jeudi.



Les tubes *PAXgene Blood RNA* contiennent un stabilisant pour l'étude des ARN et sont compatibles avec les systèmes de BD Vacutainer dont le corps de prélèvement doit être utilisé pour assurer le fonctionnement correct.

Si le prélèvement sanguin est effectué seulement pour notre usage, prélever un tube de purge (A) avant le tube *PAXgene* (B)

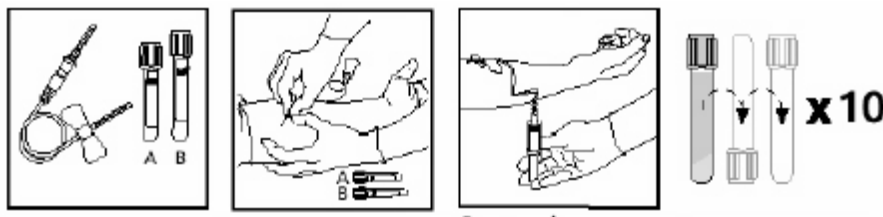

Prélever 2 fois 2,5 ml de sang en plaçant les tubes *PAXgene Blood RNA* dans le corps de prélèvement puis les **agiter par retournement au moins 10 fois**.

Conserver les tubes *PAXgene* à **la verticale** et à **température ambiante** en attendant l'envoi.

- Documents à joindre à l'envoi (si non déjà adressés au laboratoire) :

Idem Echantillons sanguins pour extraction d'ADN

- Envoyer l'ensemble à l'adresse suivante :

Pr. Serge Amselem / Dr. Marie Legendre / Dr. Irina Giurgea / Dr. Camille Louvrier
U.F. de Génétique Moléculaire
Bâtiment Ketty Schwartz
Hôpital Armand-Trousseau
26 Avenue du Docteur Arnold Netter
75571 PARIS CEDEX 12

- Transport à **température ambiante en moins de 48h**. Les prélèvements doivent arriver de préférence au laboratoire entre le lundi et le jeudi.
- Pour des délais supérieurs : Transport dans la **carboglace (-78°C)** ou à **+4°C** (pains de glace), par transporteur (Cryoexpress pour la carboglace, Fedex,...). Les prélèvements doivent arriver de préférence au laboratoire entre le lundi et le jeudi.

ECHANTILLONS SANGUINS POUR ETABLISSEMENT D'UNE LIGNEE LYMPHOBLASTOIDE

Prélèvement (stérile): **devant arriver impérativement entre le lundi et le jeudi**

- 5 ml (enfants) à 10 ml (adultes) de sang total collecté sur tube **Héparine-Li** ou **ACD** (Acide citrique Citrate Dextrose, attention à la date de péremption courte)



Etiqueter les tubes avec Nom, Prénom, Date de naissance et sexe

- Conservation et transport à **température ambiante** (ne pas conserver à +4°C : tue les cellules) avec **délai maximum d'acheminement de 48 heures**. Les prélèvements doivent **arriver impérativement au laboratoire entre le lundi et le jeudi**.

- Documents à joindre à l'envoi :

- Pour chaque personne prélevée : un consentement pour études génétiques signé par le prescripteur et le patient (formulaires différents pour les personnes majeures et mineures).

- Envoyer l'ensemble à l'adresse suivante :

Pr. Serge Amselem / Dr. Marie Legendre / Dr. Irina Giurgea / Dr. Camille Louvrier
U.F. de Génétique Moléculaire
Bâtiment Ketty Schwartz
Hôpital Armand-Trousseau
26 Avenue du Docteur Arnold Netter
75571 PARIS CEDEX 12

- à **température ambiante**, par un transporteur (Fedex,...), de telle sorte que les échantillons arrivent **impérativement entre le lundi et le jeudi**.