



SAT-
PARASITOLOGIE-
MYCOLOGIE
184 rue du faubourg
Saint-Antoine
75012 Paris

Aide au prélèvement - Scotch test anal

Ref : EP-HUEP-PRE-PRE-IT-014

Version : 02

Applicable le : 26-05-2020



1. MATERIEL :

Ruban adhésif **transparent (Scotch)** : ruban de 2 cm de large.
Lame porte-objet.

2. TECHNIQUE :

Le prélèvement se fait le matin au réveil, avant toute toilette et avant que le patient ait déféqué.

- Couper une bande de ruban adhésif de longueur inférieure à celle de la lame porte-objet
- Pencher le malade en avant, déplier les plis péri-anaux et appliquer le ruban adhésif sur le pourtour anal
- Poser le ruban sur la lame porte-objet bien dégraissée
- Appuyer fortement pour une meilleure adhérence

NB : Cette technique permet également la mise en évidence d'embryophores de *Taenia saginata* pondus au moment où l'anneau mûr force le sphincter anal.

Pour toute information complémentaire, contacter le laboratoire de Parasitologie de Saint-Antoine au 84038 ou 82186.