



Ordre des tubes pour prélèvements veineux - SAT et TNN

Les instructions

- **NE JAMAIS TRANSVASER DE SANG D'UN TUBE A L'AUTRE**

**NE PRELEVER QUE LES TUBES NECESSAIRES PUIS LES ETIQUETER IMPERATIVEMENT
AU LIT DU PATIENT APRES LE PRELEVEMENT**

Si le prélèvement est fait à l'aide d'une aiguille, l'utilisation d'un tube de purge (tube sans additif) est souhaitable avant de prélever le tube pour l'hémostase (tube citraté). Toutefois, il n'est pas indispensable en cas de mauvais capital veineux, de prélèvements faits en néonatalogie (*Recommandations CLSI (NCCLS), Déc. 2007, Doc. H3-A6 et GEHT 2007 (www.geht.org)*)

Ordre des tubes



Veiller au bon remplissage des tubes (à 90% minimum)

Il est recommandé d'**homogénéiser** le tube **dès le retrait** du corps de prélèvement par **plusieurs retournements** lents.

Identifier les tubes

Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport (cf Fiches des examens/Viskali)





NOTA : Tube de purge = tube sans additif transparent de 5 ml PET BD (Référence copilote 1717, Référence SAP 10040912)