


Transfert des urines pour un ECU en fonction du volume recueilli

Volume > 30 ml

Cas le plus fréquent

- 2 tubes bouchon vert REMPLIS
- > 1 cyto + 1 bactério
- conservateur = acide borique
- > **acheminement < 24h**
- volume 10 ml exigé
- > concentration acide borique respectée

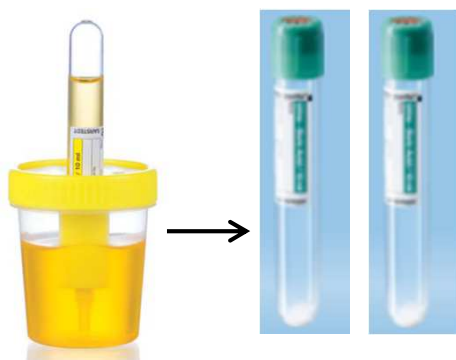


2 fois

2 tubes * V-Monovette
acide borique 10 ml

Volume de 10 à 30 ml

Cas particuliers

(pédiatrie, patients anuriques, sondage...)

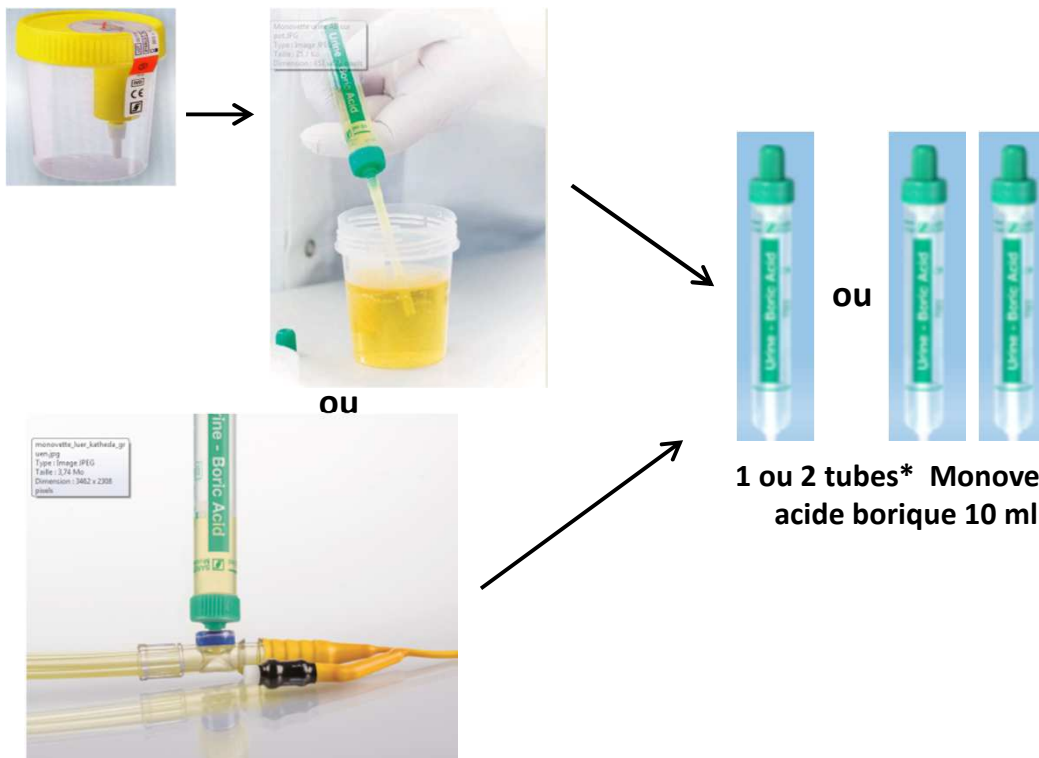

1 ou 2 tubes* Monovette
acide borique 10 ml

***TOUJOURS remplir totalement le 1^{er} tube avant de passer au 2^{ème}**



Attention si volume estimé < 10 ml

1 tube Monovette sans conservateur (bouchon jaune)

Transport immédiat au labo