

Acheminement 24h sur 24h des Hémocultures à l'Hôpital TROUSSEAU



De 8h00 à 17H00 via l'**UCORE** (ou Sa, Di et JF Labo Biochimie) au Laboratoire Saint Antoine Bât. P. Masson

Incubation / Automate et **Analyse des flacons positifs**

De 17H00 à 8H00 dépôt au **LBU multidisciplinaire** Bât. Horloge

Incubation / Automate



Rappel des Bonnes pratiques




Avant toute administration d'antibiotiques per os ou IV

Désinfection cutanée rigoureuse
 Tube de purge si KT ou PAC

Coller l'Etiquette Patient sur l'emplacement dédié



Prélever le Bon volume

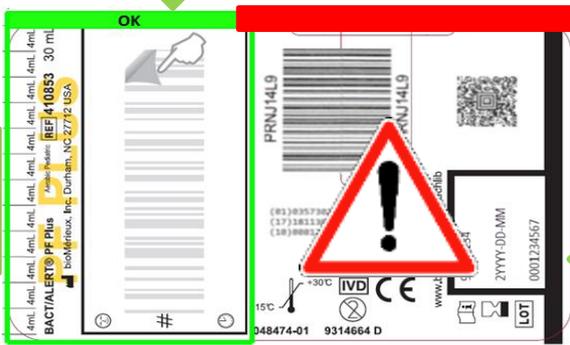

Vérifier la date de péremption

Poids	Volume	Nombre et Flacon à utiliser	
≤ 1 kg	0,5 à 2 mL	 OU 	
1,1 – 2 kg	1,5 à 4,5 mL	 OU 	
2,1 – 13 kg	3,0 à 6,0 mL	 OU 	
13 – 36 kg	20 à 24 mL	 	
> 36kg et Adulte	40 mL	  +  	